

Návod k použití

Kyslíková maska

Účel použití:

Jednorázová kyslíková maska pro podávání kyslíku mezi zdrojem kyslíku a pacientem.

Specifikace:

Pro dospělé, pro děti.

Popis:

1. Tento produkt je vyroben z polyvinylchloridu.
2. Tento produkt je jednorázovým produktem. Pokud je sterilizován etylenoxidem, je sterilní.

Způsob použití:

Před použitím zkontrolujte těsnost a expiraci produktu. Po ověření roztrhněte obal podle označení na obalu a komponenty připojte podle skutečného použití. Zkontrolujte připojení a další výkon; připojte tento produkt ke zdroji kyslíku, zapněte zdroj pro použití, další požadavky na použití podle požadavků lékaře.




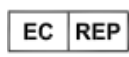













Varování:

1. Tento produkt je pouze pro jednorázové použití a po použití se musí zlikvidovat;
2. Jeli vnitřní obal poškozený, nesmí se použít;
3. Datum výroby (nebo číslo šarže) je uvedeno na balení a vnější krabici;
4. Tento produkt je sterilizován etylenoxidem a sterilizován na dva roky. Výrobky po expiraci se nesmí používat;


Skladování:

1. Tento produkt se musí skladovat v místnosti, kde relativní vlhkost nepřesahuje 80 %, bez přítomnosti korozivních plynů a dobře větrané.
2. Použití dva roky ode dne sterilizace.

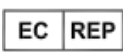
Vysvětlení symbolů:

	Výrobce		Sterilizace etylenoxidem
	Datum výroby		Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství
	Číslo šarže		Nepoužívejte, je-li obal poškozen
	Chraňte před slunečním světlem		Uchovávejte v suchu
	Upozornění		Viz návod k použití
	Označení CE		Chraňte před teplem a radioaktivními zdroji
	Nepoužívat opakovaně		Sterilní
	Expirace		Nesterilizujte opakovaně
	Neobsahuje DEHP		

Kontaktní údaje výrobce:

 Tonglu Fuke Medical Instrument Co., Ltd.
Shen'ao industrial Park, Tonglu, Hangzhou, 311509Zhejiang, China

Zplnomocněný zástupce pro Evropu

 Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands

Dodavatel / distributor v ČR

Kaiserman spol. s r.o.
Trnkova 137, 628 00 Brno tel.: 800 888 248